

Obličejový štít FPM 21

Návod ke kompletaci

Informace o produktu

Jedná se o ochranný štít typu FPM21 určený k ochraně očí, obličeje, proti kapenkám a proti mírným mechanickým rizikům. Štít není před expedicí dezinfikován. **Doporučujeme** před použitím **dezinfikovat**. Štít není certifikován.

Doporučené metody dezinfekce a podmínky:

- horkovzdušná sušárna - 65 °C (149 °F), 60 minut
- WHO dezinfekce - 99% IPA, 5 minut
- Izopropylalkohol (IPA) - 96%, 5 minut

Vyrobeno z materiálů:

- hledí - PC 0,8mm síla
- čelenka - PETG
- guma - 50% ELASTAN, 50% POLYESTER

1.



Příprava veškerých součástí nutných pro kompletaci štítu.

2.



Odstraníme ochranné fólie z obou stran hledí.

3.




Hledí připevníme na oba střední piny čelenky a přidržíme, poté přihneme pravý kraj a zacvakneme pin. Stejný postup opakujeme na levé straně.

4.




Štít otočíme čelenkou dolů, zapřeme a zacvakneme spodní díl štítu.

5.

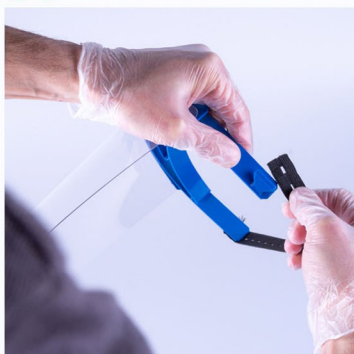

Na konce čelenky nasadíme děrovanou gumičku. Délku upravíme dle potřeby.

6.

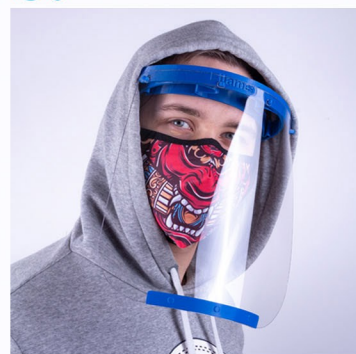

Voilà a štít máte hotov. **Chraňte sebe a svoje okolí.**

Filament PM

share your prints with us #filamentpm